



دستورالعمل نمونه‌گیری و انتقال آزمایش‌های انعقادی (خارج از
آزمایشگاه):

شامل:

**PT , PTT , Fibrinogen , FDP , D.dimer , Protein C ,
Protein S , APCR (Leiden factor) , Anti Thrombin III**

۱- نمونه حتماً در لوله‌های مخصوص آزمایشگاه، که در اختیار شما قرار
داده شده گرفته شود.

۲- نمونه می‌بایست از دستی که به سرم، انژیوکت هپارینه متصل
نمی‌باشد، جمع‌آوری گردد.

۳- پس از نمونه‌گیری لوله مورد نظر چند بار با وارونه کردن آرام مخلوط
گردد. (حدود یک دقیقه)

۴- به محض نمونه‌گیری، نمونه باید دور از گرما و یا سرما، در دمای
۲۵ - ۱۵ درجه سانتی‌گراد به آزمایشگاه فرستاده شود.

با تشکر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نرگس