

Serum-

پس از خونگیری (سرنگ یا سیستم Venoject) درون لوله ساده یا لوله ژل دار (اگر از سرنگ استفاده می شود سر سوزن خارج شده و خون به آرامی از کناره داخلی لوله اضافه شود) حداقل ۱۵ دقیقه و حداکثر ۳۰ دقیقه (با توجه به نوع آزمایش مورد درخواست شاید کمتر باشد) در دمای محیط (۲۵-۱۵ درجه سانتی گراد) بماند و سپس در دور rpm ۳۰۰۰-۲۵۰۰ به مدت ۱۰-۱۵ دقیقه سانتریفوژ شود (شاید سانتریفوژیچال دار نیاز باشد) سرم جدا شده و مدت انجام آزمایش ، نگهداری یا انتقال نمونه اقدام گردد . شاید با توجه به نوع آزمایش نیاز داشته باشیم لوله و سایر امکانات سرد و گرم استفاده شود .