



نمونه گیری Quantiferon:

نمونه این تست فقط خون تام می باشد.

برای هر بیمار سه ویال مختلف (کپ خاکستری، کپ قرمز، کپ بنفش) وجود دارد. با استفاده از سرنگ استریل می بایست یک سی سی (تا خط نشانه) خون در هر ویال تخلیه شود. دقت شود فقط یک سی سی خون تخلیه گردد، نه بیشتر نه کمتر. بعد از نمونه گیری از بیمار برای تخلیه در هر ویال باید از یک نیدل جدید استفاده کرد و به هیچ عنوان نباید از نیدل ویال قبلی برای تخلیه در ویال دیگر استفاده شود.

بعد از تخلیه خون در هر ویال بلافاصله باید ویال ها ۱۰ مرتبه واژگون گردند به طوری که تمام دیواره داخلی ویال به خون آغشته گردد. سپس نمونه ها باید سریعاً به آزمایشگاه انتقال داده شوند.

با تشکر

آزمایشگاه پاتوبیولوژی نرگس