

پلاسما سیتراته - PC

پس از خونگیری (سرنگ یا سیستم venoject) (درون لوله تری سدیم سیترات ۱٪ مولار (اگر سرنگ استفاده می‌شود سر سوزن خارج شده و خون به آرامی از کناره داخلی اضافه شود) حدود ۳ - ۵ دقیقه به آرامی مخلوط شود و حداکثر تا ۱۰ دقیقه (شاید با توجه به نوع آزمایش بلافاصله سانتریفوژ انجام شود یا شاید نیاز به سانتریفوژ یخچال دار باشد) با دور ۳۰۰۰-۳۵۰۰ به مدت ۱۵-۲۰ دقیقه سانتریفوژ شود ، بلافاصله پلاسما برای انجام آزمایش ، نگهداری یا انتقال جداسازی شود.

۹ part WB + ۱ part citrate Na
for ESR : ۴ part WB + ۱ part citrate Na